

TULMAR

IDÉAL POUR UN USAGE COMMERCIAL

Conçu pour arrêter les gouttelettes, peut être ajusté pour améliorer le confort et la protection

CARACTÉRISTIQUES ET INFORMATIONS SUR LE PRODUIT

La visière réutilisable TULMAR est une visière faciale complète qui offre une protection et un confort infailibles. La protection s'étend d'une oreille à l'autre. Il est composé d'une bande de mousse confortable associée à du vinyle léger et durable, pour une protection contre les gouttelettes et les aérosols.

- Visière transparente, anti-rayures, anti-reflets
- Bande ajustable pour un confort optimal
- Peut se porter par-dessus des lunettes
- Réutilisable jusqu'à 50 fois
- Facile à désinfecter à l'aide de peroxyde, de lingettes imprégnées d'alcool ou avec un système de retraitement des dispositifs médicaux
- Dimensions de la visière : Lexan, largeur 13" (33 cm), hauteur 9 1/8" (23,10 cm), épaisseur 0,03" (0,07 cm)



DES VISIÈRES DE PROTECTION CONÇUS POUR LA PREMIÈRE LIGNE

Conçus pour une utilisation en milieu hospitalier, notamment dans les unités de soins intensifs et les salles d'opération.

POUR ENFILER ET RETIRER

1. Tenez l'écran facial avec les deux mains, courbez-le vers l'avant et tendez l'élastique à l'aide de vos pouces.
2. Positionnez l'élastique derrière votre tête, de façon que la mousse repose sur votre front.
3. Une fois que l'écran facial est en place, assurez-vous qu'il couvre l'avant et les côtés de votre visage. Aucune partie ne doit être découverte.
4. Pour retirer l'écran facial, penchez légèrement la tête en avant, saisissez la sangle au niveau des tempes et tirez vers l'avant et par-dessus la tête pour écarter l'écran facial de votre visage.
5. Nettoyez et désinfectez après chaque utilisation.

CONTACT

TULMAR Safety Systems Inc.

1123 rue Cameron, Hawkesbury, ON Canada, K6A 2B8

Contact: Lisa Max +1 438-406-7507

OU

Courriel : lmax@tulmar.com pour obtenir un devis.

Un montant minimum de commande s'applique.

FABRIQUÉ AU CANADA

Les écrans faciaux sont faciles à porter et parfaits pour arrêter les gouttelettes, ils se désinfectent facilement et sont réutilisables, et contrairement aux masques, les écrans transparents permettent une meilleure communication : il est possible de voir les expressions faciales, et de lire sur les lèvres pour les personnes malentendantes.

Les écrans faciaux TULMAR sont actuellement vendus auprès des :



Hôpitaux



Cabinets
Privés



Compagnies
Aériennes



Dentistes



Restaurants



Garderies



Usines



Transformation
Alimentaire



Usines
Chimiques